

CAPARAZÓN PROTECTOR	CAPARAZÓN FORMADOR	CAPARAZÓN RECOLECTOR
		
El protector de pezones protege de grietas / irritaciones a los pezones. El tamaño de abertura proporciona espacio libre de roce, ideal para ayudar en casos de extrema sensibilidad.	Gracias a su diseño y tamaño de abertura, el formador de pezones proporciona a las mujeres que tengan los pezones planos o invertidos la posibilidad de prepararlos para la lactancia.	La copa para recoger la leche Medela acumula la leche perdida y proporciona una comodidad única. Su forma anatómica y su material flexible, que no irrita la piel, permiten llevarla de forma cómoda y discreta.
Forma Anatómica	Forma Anatómica	Forma Anatómica
Capa de silicona flexible (no irrita).	Capa de silicona flexible (no irrita).	Capa de silicona flexible (no irrita).
Permiten llevarlos cómodamente y de forma invisible.	Permiten llevarlos cómodamente y de forma invisible.	Permiten llevarlos cómodamente y de forma invisible.
Agujeros de ventilación en la parte superior de la copa facilitan la circulación de aire, lo que evita la formación de humedad y favorece la curación.	Agujeros de ventilación en la parte superior de la copa facilitan la circulación de aire, lo que evita la formación de humedad y favorece la curación.	Para evitar la acumulación de humedad, recomendamos retirar la copa para recoger la leche cada 2 o 3 horas y dejar secar los pechos al aire.
Abertura grande	Abertura pequeña	Abertura grande
<p>Modo de Uso</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Coloque el protector de pezón ya puesto el sostén, hasta que la abertura de la capa de silicona se encuentre exactamente sobre el pezón. ✓ Los agujeros de ventilación de la copa deben estar hacia arriba ✓ Este protector puede llevarse permanentemente entre las tomas. ✓ Evite llevarlos por la noche para prevenir la sensibilización de la piel 	<p>Modo de Uso</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Coloque el formador de pezón ya puesto el sostén, hasta que la abertura de la capa de silicona se encuentre exactamente sobre el pezón. ✓ Los agujeros de ventilación de la copa deben estar hacia arriba ✓ Capa de silicona del formador ejerce una presión suave y continua sobre la areola del pezón, con lo que el pezón es empujado hacia fuera. ✓ Al principio debe llevarse el formador de pezones una hora al día; este tiempo se aumentará progresivamente hasta las ocho horas diarias. ✓ Evite llevarlos por la noche para prevenir la sensibilización de la piel. ✓ Uso debe ser indicado por un profesional. 	<p>Modo de Uso</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Coloque el recolector de leche ya puesto el sostén, hasta que la abertura de la capa de silicona se encuentre exactamente sobre el pezón. ✓ Asegúrese de que el pico de la copa esté siempre hacia arriba al llevarlo. ✓ Al retirar la copa del pecho es recomendable inclinarse algo hacia delante. ✓ La leche recogida puede vaciarse a través del pico. ✓ Sólo debe darse al bebé la leche recogida durante la toma en el otro pecho. Si no se la da usted en el acto, méntala inmediatamente en la nevera y utilícela antes de 24 horas ✓ Evite llevarlos por la noche para prevenir la sensibilización de la piel
<p>Limpieza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Limpie el formador de pezones desmontado con un deter - gente suave, aclárelo con agua fría y déjelo secar sobre un paño limpio. ✓ Se pueden lavar en el lavavajillas o esterilizar en autoclave. 	<p>Limpieza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Limpie el formador de pezones desmontado con un deter - gente suave, aclárelo con agua fría y déjelo secar sobre un paño limpio. ✓ Se pueden lavar en el lavavajillas o esterilizar en autoclave. 	<p>Limpieza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Limpie el formador de pezones desmontado con un deter - gente suave, aclárelo con agua fría y déjelo secar sobre un paño limpio. ✓ Se pueden lavar en el lavavajillas o esterilizar en autoclave.