

Pezonera de Contacto

*No. 1 choice
of hospitals
& mothers*


Instrucciones de Uso




Lave manos y pechos, para los pechos nunca emplee jabón o alcohol, ya que pueden secar la piel y causarle grietas en los pezones.



Humedezca la pezonera con agua pues facilitará que se adhiera a la piel.

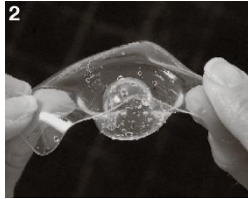

Presione la punta casi hasta adentro y agarre las alas de la pezonera.

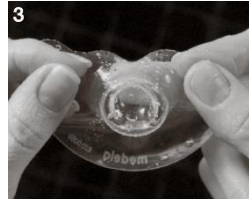

Cubra los orificios con el dedo medio y coloque la pezonera centrada sobre el pezón.



Manteniendo el dedo sobre los orificios presione suavemente las alas de la pezonera hasta que encaje perfectamente en el pezón.

Para elegir el tamaño correcto

- ✓ Considerar tanto a la madre como al bebé.
- ✓ La pezonera se debe ajustar confortablemente sin pellizcar y el pezón debe entrar cómodamente a lo ancho.
- ✓ Disponible en 3 tamaños: S/16mm, M/20mm o L24/mm.

Recomendaciones

- ✓ Pezonera Contact S/16mm - Pezones pequeños/sensibles
- ✓ Pezonera Contact M/20mm - Pezones planos
- ✓ Pezonera Contact L24/mm. - Pezones Umbilicados

Alternativas de Limpieza

- ✓ Lave y enjuague las pezoneras Contact antes del primer uso y posteriormente después de cada uso.
- ✓ Limpieza con agua caliente y jabón. Enjuague en agua limpia.
- ✓ Desinfecte las pezoneras lavándolas en una lavadora térmica (a aprox. 93°C).
- ✓ Esterilice todas las pezoneras en autoclave a 134°C durante 3 (o 18) minutos, o a 125°C durante 15 a 20 minutos.



Nota: La sección abierta debe apuntar en la dirección de la nariz del bebé mientras mama.