

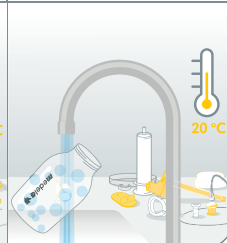
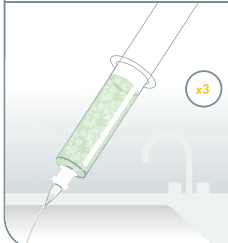
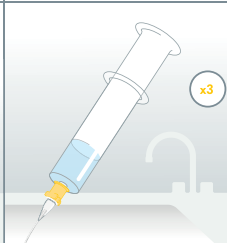
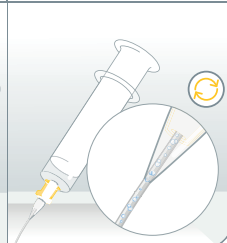
Sistema de alimentación suplementaria (SNS)

Guía paso a paso sobre cómo limpiar, montar y utilizar su SNS

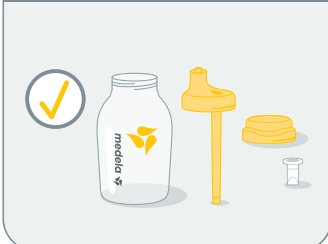
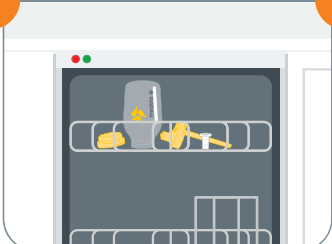


Cómo limpiar el SNS

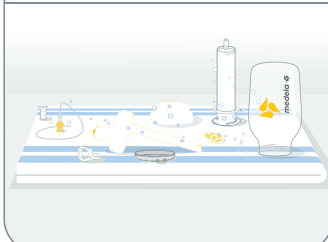
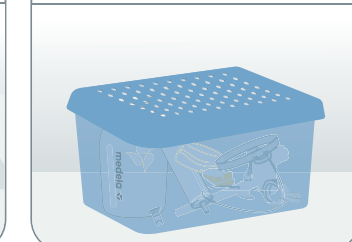
Limpieza antes del primer uso y después de cada uso

Enjuague todas las piezas con agua fría (aprox. 20°C).	Limpie todas las piezas con bastante agua jabonosa caliente (aprox. 30°C).	Enjuague todas las piezas de nuevo con agua fría (aprox. 20°C).	Llene el sistema de limpieza con agua jabonosa tibia y enjuague el tubo tres veces.	Vuelva a enjuagar el tubo tres veces con agua limpia.	Finalmente, purgue el tubo con aire hasta que el interior esté visiblemente seco.
					

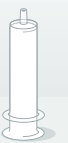
Limpieza antes del primer uso y una vez al día

Siga limpiando el recipiente, la tapa TwistLok, la válvula y la tapa con agua hirviendo, en el lavavajillas o con las bolsas Quick Clean™ de Medela.	Para limpiar con agua hirviendo, cubra el recipiente, la tapa TwistLok, la válvula y la tapa con agua y deje hervir durante cinco minutos.	Para la limpieza en el lavavajillas, coloque el recipiente, la tapa TwistLok, la válvula y la tapa en la parte superior o en la cesta de los cubiertos.	Para limpiar el recipiente, la tapa TwistLok, la válvula y la tapa en el microondas, utilice las bolsas Quick Clean™ de Medela de acuerdo con las instrucciones de la bolsa.
			

Secado y almacenamiento

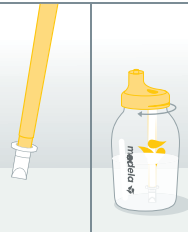
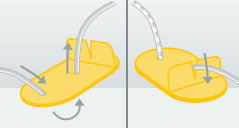
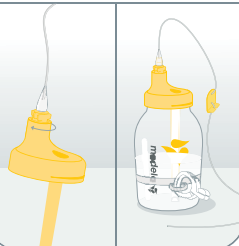
Tras la limpieza, seque todas las piezas con un paño limpio o déjelas secar sobre un paño limpio.	Deposite los componentes limpios en un lugar limpio. No almacene las piezas en una bolsa o recipiente herméticos.
	

Su sistema SNS

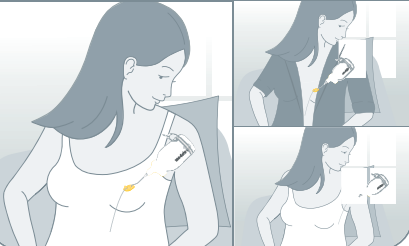
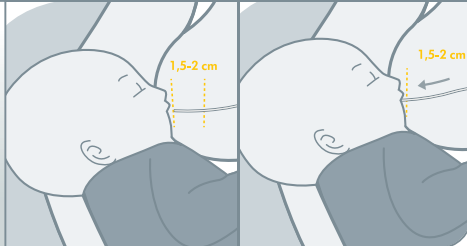
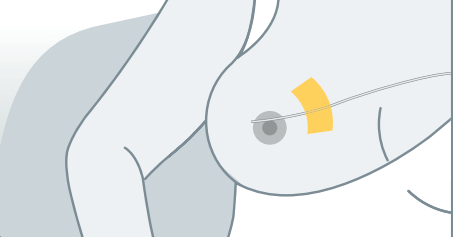
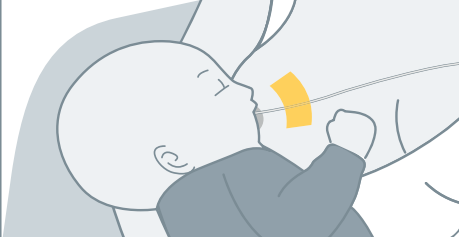
				
Contenedor	Tapa	Tapa TwistLok	Tubo	Sistema de limpieza
				
Anillo	Clip	Válvula	Pinza	

Cómo montar el SNS

Lávese minuciosamente las manos con agua y jabón antes de utilizar el producto.

1 Llene el recipiente con la cantidad necesaria de leche. 	2 Fije el clip al anillo. Coloque el anillo y el clip montados alrededor de la base del recipiente. 	3 Coloque la válvula en el extremo de la tapa TwistLok. Enrosque la tapa TwistLok montada en el contenedor. 	4 Pase el tubo TwistLok a través de la pinza y presione el tubo en la abrazadera para que la leche no fluya. 	5 Enrosque el tubo de montaje y la pinza en la tapa TwistLok. 
--	--	--	---	--

Cómo colocarse y proporcionar alimentación con el SNS

1 Fije el SNS de forma segura y cómoda en el sujetador, top o la almohada situada detrás. 	2 - Opción A Para colocar el tubo, primero coloque al bebé al pecho. Una vez que el bebé tenga un buen agarre, inserte con cuidado el tubo, aproximadamente 1,5-2 cm, en la comisura superior de la boca del bebé.  	
2 - Opción B De forma alternativa, se puede utilizar una cinta de fijación para ayudar a colocar el tubo. En primer lugar, fije el extremo del tubo al pecho con el pezón sobresaliendo unos 0,5 cm en la posición de las 10 o las 2 en punto. 	A continuación, coloque al bebé al pecho como lo haría normalmente. 	3 Suelte la pinza para que fluya la leche. 

Si no tiene claro cómo utilizar el SNS, póngase en contacto con su especialista en lactancia o profesional sanitario.

Consejos y trucos

- La altura del sistema se puede elevar para aumentar el flujo y bajar para disminuirlo.
- El uso del SNS puede requerir un par de intentos antes de que se convierta en una forma sencilla de alimentarse juntos. Si usted o su bebé tienen dificultades o sienten molestias, vuelva a intentarlo de nuevo en la siguiente toma.

Escanee el código QR para obtener más información acerca del SNS

