

No. 1 choice  
of hospitals  
& mothers

# Parche Hidrogel



Especialmente desarrollado para problemas de lactancia debido a pezones adoloridos o agrietados, nuestros parches de hidrogel ofrecen un efecto calmante y de alivio instantáneo, además ayudan al proceso de curación, dado que mantienen el área del pezón húmedo. Para una mayor seguridad, el Parche Hidrogel cuenta con una barrera antimicrobiana en caso de herida.

Las grietas deben mejorar a las 48 hrs, como para no necesitar seguir el tratamiento.

Parche Hidrogel Medela se ha "probado dermatológicamente" considerándose un producto agradable a la piel, ya que su diseño y textura permiten amortiguar físicamente el área del pezón, lo cual evita la fricción innecesaria, y no fue asociado con irritación de la piel o alergias en las mujeres que no pueden seguir amamantando por las molestias de dolor o grietas de pezones.

## Precauciones Importantes

- Usar sólo según lo indicado.
- Mantener fuera del alcance de los niños, especialmente los envoltorios plásticos.
- Debe tenerse cuidado con el uso de los parches en pezones agrietados o en caso de micosis.
- Si los pezones están agrietados, sangran o producen ardor, debe consultar con su matrona o con su médico.
- Para evitar dolores en el pezón es importante que el bebé tome el pecho en una posición adecuada.

**Opcional:** Para mejorar el efecto suavizante, pase brevemente el lado del parche con gel por agua fría (1 - 2 segundos), sacuda el exceso de agua y déje reposar durante 2 minutos. No enjuague más de 2 veces al día.



## Instrucciones de Uso

Lávese las manos antes de usar el producto.

- Abra las bolsa.
- Saque el parche de gel del envoltorio de plástico.
- Aplique suavemente el lado del parche con gel directamente sobre su pezón.
- No utilizar si la bolsa esta abierta o dañada.
- Antes de dar el pecho quite el parche gel.
- Depósitela sobre una superficie limpia.
- Lave suavemente el pecho y séquelo dando palmaditas.
- Seguidamente empiece a dar el pecho.
- Tras dar el pecho vuelva a aplicar el parche de gel.

*No use jabones o detergentes para limpiar el parche.*

*Guarde el parche de gel en un lugar fresco y seco.*

*Para aumentar el efecto refrescante, los parches de gel, pueden guardarse en el refrigerador.*

*Reutilizable durante 24 horas.*

*Si el parche adquiere un color turbio o lechoso, por favor deséchelo y use uno nuevo.*



1.- Lávese las manos antes de usar el producto.



2.- Abra la bolsa y saque el parche de gel del envoltorio de plástico.



3.- Aplique suavemente el lado del parche con gel directamente sobre su pezón.



4.- Lave suavemente el pecho con agua tibia y séquelo dando palmaditas. A continuación empiece a dar el pecho.

Ingredientes: Agua, glicerol, entrecruzado